

TENSIOMETRO DIGITAL

LT P30

Ficha técnica





El tensiómetro digital lenz mide la presión arterial de manera automática y precisa. Su sistema con altavoz es una ayuda auditiva que facilita la interpretación de los valores medidos.

Es ideal para pacientes que deben llevar un control de su presión. Cuenta con el indicador de clasificación de los niveles de presión arterial de la OMS



Detecta

latidos irregulares



Promedio

de 3 últimas lecturas



Incluye

estuche



Garantía

3 años



Operación

con solo botón



3 x 45

memorias



Resultados

altavoz



Pantalla LCD retroiluminada

Fácil lectura en condiciones de poca luz



Brazalete extralargo
22-42 cm ancho



Fabricado bajo estándares de la OMS

#1 en confiabilidad

Especificaciones técnicas

Referencia Kit	LT-P30
Garantía	3 años
Tipo de inflado	Automático con bomba interna
Función de memoria	2 usuarios (120 memorias cada uno)
Medidas brazalete	46,5 cm de ancho
Frecuencia de pulso	30 ~ 200 bpm/±5%
Zona de medición	Brazo superior
Método de medición	Oscilométrico
Rango sístole	60 mmHg ~ 230mmHg
Rango diástole	40 mmHg ~ 130mmHg
Frecuencia de presión	0-280mmHg(0-37.3kPa) /±3mmHg(±0.4kPa)

Accesorios incluidos



Cable USB - Tipo C



Brazalete extralargo Adulto



Bolsa de transporte



APROBADO
Administración de Alimentos y Medicamentos



Almacenamiento y transporte	
Temperatura	-40 °C ~ 55°C
Humedad	≤ 93% (sin condensación)
Presión atmosférica	50 kPa ~ 106 kPa

Partes del dispositivo



- 1 Fecha
- 2 Pantalla LCD
- 3 Botón ON/OFF

- 4 Carga de Batería
- 5 Indicador de presión
- 6 Hora

Cómo ponerte el brazalete de tu Tensiómetro Digital



Paso 1

El borde inferior del brazalete debe estar a 2-3 cm del pliegue del codo.



Paso 2

El brazalete debe estar a la misma altura del corazón.



Paso 3

Presiona el botón de encendido y empezará la medición.