



Silla de Ruedas de Transporte

Cód. Inv.:IMD904BP

Características

- Marco en acero pintado
- Espaldar fijo
- Apoyabrazos removibles acolchados
- Reposapiés removibles
- Calapiés abatibles en aluminio
- Ruedas traseras de 12" en PU con bloqueo de freno manual a cada lado
- Rin estrella
- Ruedas delanteras macizas de 8"
- Tapicería acolchada en lona (NYLON)
- Registro Sanitario : 2021DM-0023196

Descripción, propósito de uso y beneficios

Diseñadas para permitir el traslado de personas con alguna condición de discapacidad motriz, dorsal o enfermedad física, beneficia al paciente en mantener total posicionamiento, ya que cuenta con soportes de cabeza, tronco y cinturón de seguridad, evitando así el desplazamiento del tronco. Brinda comodidad para su traslado y descanso.

Especificaciones Técnicas:

	Ancho de Despliegue	62 cm		Altura del Asiento	49 cm		Profundidad del Asiento	43 cm
	Ancho de plegado	27 cm		Largo Total	98 cm		Altura del Espaldar	42 cm
	Ancho del asiento	43 cm		Rueda Trasera Diámetro	12"		Peso máximo	100Kg
	Altura Total	88 cm		Rueda Delantera Diámetro	8"		Peso Total Silla	14Kg

Dimensiones empaque: 71*28*90 cm - Caja: 1 pieza

Instrucciones de uso

- Saque la silla de ruedas de la caja, ábrala
- Gire los reposapiés con los calapiés al lugar adecuado. Ajuste firmemente el tornillo debajo del calapiés para evitar que se caiga.
- Cuando termine de usar, gire los reposapiés hacia arriba hasta la posición vertical con ambas manos, sujete el centro de la tapicería del asiento en el borde delantero y trasero y levántelo.
- Capacidad máxima de carga 100kgs. Los usuarios no pueden exceder la máxima capacidad de carga.



Almacenamiento y condiciones de transporte

- Guarde la silla en un lugar de almacenamiento seco y ventilado
- La temperatura de almacenamiento es de 5 a 55 °C

Mantenimiento

- Comprobar el ajuste de los tornillos y la estabilización de la silla antes de usar
- La limpieza regular evitará que el polvo se adhiera a los tubos y así mejorará el buen funcionamiento de la silla
- Cuando la silla presente óxido en la parte de la tornillería se recomienda aplicar Crema Rubí o brilla metal y limpiar con un trapo.
- Se recomienda NO usar esponjillas de acero para limpiar la silla debido a que puede rayar el material de la estructura.

Advertencias y precauciones

- Seguir TODAS las advertencias y precauciones del manual
- No Atreverse a SUBIR o BAJAR rampas o pendientes mayores de 10 grados
- No intente subir o bajar una pendiente con una película de agua, hielo o aceite
- No intente circular sobre bordillos u obstáculos. De lo contrario, su silla podría volcarse y provocarle daños corporales o daños al dispositivo
- No se pare en el marco o calapiés de la silla
- El uso debe hacerse en superficies planas

Garantía

- Un año por estructura
- Un mes por defectos de fábrica (tapicería y rodamiento)
- Por desgaste en rodamiento, tapicería y uso inadecuado, no cubre la garantía