

Silla de Ruedas bariátrica

Cód. Inv.: IMD951B - 55



Goshen

Características

- Marco plegable de acero
- Marco en acero pintado con doble cruceta
- Apoyabrazos acolchados abatibles
- Ancho de asiento de 55 cm
- Reposapiés removibles
- Calapies abatibles en ABS
- Ruedas traseras de 24", llanta neumática con bloqueo de freno manual en cada lado
- Rin estrella
- Ruedas delanteras maciza de 200 *50 cm
- Tapicería en lona doble acolchado
- Capacidad máxima 136Kg
- Sistema antivuelco
- Registro Sanitario : 2021 DM 0023196

Descripción, propósito de uso y beneficios

Diseñadas para personas con alguna condición de discapacidad, pacientes post operatorio y/o con lesiones ortopédicas y traumáticas en piernas y pies. Brinda comodidad para su traslado y descanso. Se puede plegar para almacenamiento y transporte fácil

Especificaciones Técnicas:

	Ancho de Despliegue	71 cm		Altura del Asiento	52 cm		Profundidad del Asiento	46 cm
	Ancho de plegado	32 cm		Largo Total	110cm		Altura del Espaldar	40 cm
	Ancho del asiento	55 cm		Rueda Trasera Diámetro	24"		Peso máximo	136 Kg
	Altura Total	94 cm		Rueda Delantera Diámetro	200*50 cm		Peso Total Silla	20.8 Kg
Dimensiones empaque: 83*33*95 cm - Caja: 1 pieza								

Instrucciones de uso

Saque la silla de ruedas de la caja, ábrala



Gire los reposapiés con los calapiés al lugar adecuado. Ajuste firmemente el tornillo debajo del cala pies para evitar que se caiga.



Cuando termine de usar, gire los reposapiés hacia arriba hasta la posición vertical con ambas manos, sujete el centro de la tapicería del asiento en el borde delantero y trasero y levántelo.

Capacidad máxima de carga 136 kgs. Los usuarios no pueden exceder la máxima capacidad de carga.

Almacenamiento y condiciones de transporte

Guarde la silla en un lugar de almacenamiento seco y ventilado
La temperatura de almacenamiento es de 5 a 55

Mantenimiento

Comprobar el ajuste de los tornillos y la estabilización de la silla antes de usar
La limpieza regular evitará que el polvo se adhiera a los tubos y así mejorará el buen funcionamiento de la silla

Cuando la silla presente óxido en la parte de la tornillería se recomienda aplicar Crema Rubi o brilla metal y limpiar con una trapo.

Se recomienda NO usar esponjillas de acero para limpiar la silla debido a que puede rayar el material de la estructura.

Advertencias y precauciones

Seguir TODAS las advertencias y precauciones del manual
No Atreverse a SUBIR o BAJAR rampas o pendientes mayores de 10 grados
No intente subir o bajar una pendiente con una película de agua, hielo o aceite
No intente circular sobre bordillos u obstáculos. De lo contrario, su silla podría volcarse y provocarle daños corporales o daños al dispositivo
No se pare en el marco o calapiés de la silla
El uso debe hacerse en superficies planas

Garantía

Un año por estructura

Un mes por defectos de fábrica (tapicería y rodamiento)

Por desgaste en rodamiento, tapicería y uso inadecuado, no cubre la garantía