



SIMULADOR DE CATETERISMO FEMENINO LIFE/FORM



El simulador de cateterismo femenino está construido con un depósito de vejiga, uretra del paciente y una válvula que simula el esfínter uretral interno. La sensación normal de resistencia y presión se experimentará cuando se pase un catéter a través de la uretra, pasando por el esfínter y dentro de la vejiga. Cuando el catéter ingresa a la vejiga, la orina artificial (agua) fluirá desde el catéter al igual que en un paciente real, y el manguito debe estar completamente desinflado antes de retirar el catéter. El uso inadecuado de un Foley puede dañar el simulador. Este simulador es el torso de una mujer de mediana edad con los muslos abducidos para la posición adecuada durante el cateterismo. Los genitales externos y el perineo están moldeados de forma realista. Los labios menores se pueden separar de forma natural para revelar el clítoris, la abertura uretral y el introito vaginal.

INCLUYE:

- Estuche rígido
- Lubricante
- Catéter
- Guía didáctica.
- Soporte de suministro de fluido no incluido.
- Tamaño de la caja: 24 x 16 x 13 pulg.

* NOTA:

El catéter de Foley de silicona se puede utilizar si se tiene mucho cuidado de inflar el manguito solo cuando está en la posición adecuada. Al igual que en un paciente real, el manguito debe estar completamente desinflado antes de retirar el catéter. El uso inadecuado de una sonda de Foley puede dañar el simulador, al igual que cuando se usa una sonda de Foley con un paciente real.

Sujeto a disponibilidad del proveedor. Periodo aproximado de entrega es de 8 a 10 semanas.