

TENSIÓMETRO ANEROIDE

HS - 20C



Unidad de venta: Unidad.

Uso: Pacientes neonatos y pediátricos.

Características:

- Material: Manómetro de aleación de aluminio especial.
- Brazaletes: Algodón clásico.
- Diseño: Brazaletes de dibujos animados para recién nacidos y para niños.
- Manguera: PVC de 2 tubos para recién nacidos y para niños.
- Pera: PVC estándar.
- Válvula: De liberación.
- Válvula: De extremo cónico.
- Empaque: Bolsa con cremallera de dibujos animados.
- Garantía: 6 meses.
- Marca: DM.
- Unidad de venta: Unidad.
- Categoría: Equipos Médicos, Equipos de Cuidados en Casa.
- Invima: 2020DM-0022495.

Recomendaciones

- Evite los solventes y los aceites.
- Limpiar con un paño humedecido con alcohol o agua con jabón.

- En caso de lavar el brazalete, tener en cuenta previamente retirar la cámara de aire.

Modo de uso

- Seleccione el tamaño apropiado del brazalete según el paciente neonato o pediátrico, acorde a la circunferencia del brazo.
- Antes de ponerse las olivas en las orejas, sujete los auriculares delante de usted de manera que los tubos apunten hacia fuera.
- Cuando las olivas estén en los oídos, los auriculares deben estar apuntando hacia delante.
- Apoye la campana del fonendoscopio sobre la arteria humeral ubicada en el interior del pliegue del codo del paciente. Cierre la válvula y apriete la pera para insuflar el brazalete.
- Afloje la válvula de la pera para disminuir la presión y con el fonendoscopio identifique los sonidos observando la lectura en el manómetro.