




COMPRESA DE FRIO Y CALOR

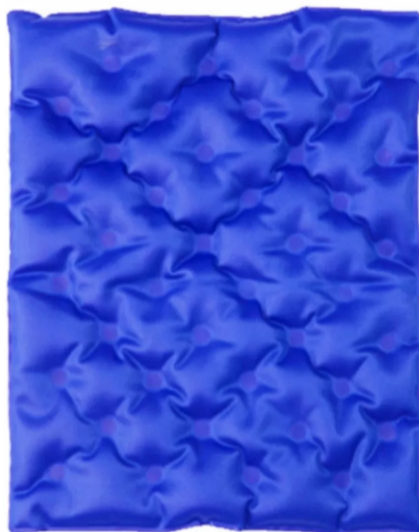

DESCRIPCION QUIMICA DEL GEL	Gel viscoso elaborado a partir de la mezcla de espesantes, preservantes, anticongelantes, agua potable y colores artificiales. No tóxicos, biodegradables, no invasivo.
USO	Elaboradas para el cuidado corporal en tratamientos frío (crioterapia) o calor (termoterapia).
PROPIEDADES	Retenedor de frío o calor. Para uso externo, la compresa ayuda a relajar y aliviar.
DESCRIPCION FISICA DE LA COMPRESA	Compresas elaboradas con plástico viniglas, viene con revestimiento en tela, econoflex y vinilo flexible en el interior, materiales resistentes al frío y al calor.
INSTRUCCIONES DE USO PARA COMPRESA FRIA	Coloque la compresa en el refrigerador (parte inferior de la nevera) hasta obtener la temperatura deseada, si desea más frío colocarla en el congelador el tiempo que considere necesario.
INSTRUCCIONES DE USO PARA COMPRESA CALIENTE	Para microondas envolver la almohadilla en una toalla húmeda por dos (2) minutos, o el tiempo que sea necesario hasta obtener la temperatura deseada. Baño maría: Calentar previamente el agua y sumergir la compresa, déjela hasta obtener la temperatura deseada.
TIEMPO DE GARANTIA	60 días
INSTRUCCIONES DE PRESERVACION	Almacenar en un espacio, bodega o área cubierta, seca y bien ventilada, a temperatura ambiente o de refrigeración. Proteger de la exposición excesiva de luz.
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL	No recupere el producto. Elimine el residuo por absorción con tela absorbente, toalla o trapeador. Lave con abundante agua. Producto biodegradable no toxico.