



MASCARA NASAL N5

BMC



BMC nos dedicamos como siempre al desarrollo de la máscara que pueda ponerse con más rapidez. N5 Nasal Mask fue diseñada para más rendimiento y confort durante la terapia.

Función

- Cojín que Quede al Paciente Automáticamente
La muesca inteligente encima del cojín ayuda para ajustar automáticamente con el puente de la nariz.
Marco Compacto

- El marco de la frente, flaco y claro, es compatible con los cuatro tamaños de cojín P, M, G y SG.
- Estructura Integrada
- La integración del cojín y su marco provee más estabilidad y conveniencia.

Codo Universal

- El codo giratorio universal permite al paciente disfrutar de la comodidad de uso.

Tallas La Mascarilla de CPAP:

Para elegir tu talla, mide el ancho de tu nariz.

La relación de las tallas es la siguiente:

- Si la distancia es menor a 3.5 centímetros, tu talla es la S.
- Si la distancia es menor a 4 centímetros, tu talla es la M.
- Si la distancia es superior a 4 centímetros, tu talla es la L.

Limpieza Es recomendable que realices una limpieza semanal de tu Mascarilla CPAP Nasal N5:

- Lava por separado todos los componentes de la mascarilla.
- Realiza la limpieza con agua tibia y un jabón líquido suave.
- Aclara todo completamente y asegurate de haber retirado los restos de jabón.
- Déjalos secar en una toalla o un paño que no deje restos de tejido.
- Cuando esté completamente seca, puedes armar de nuevo la mascarilla y volver a usarla.