



SILLA DE RUEDAS

ESTÁNDAR PEDIÁTRICA REF: JL802-35



Descripción

Diseñada para permitir el traslado de un lugar a otro a aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión, enfermedad física o dificultad para mantener la posición bípeda. Brinda comodidad para su traslado y descanso. Se puede plegar para almacenamiento y transporte fácil.

Características

- Marco de acero Pintado
- Espaldar fijo
- Apoyabrazos fijos acolchados
- Reposapiés fijos
- Calapiés abatibles en aluminio
- Ruedas traseras macizas de 22" con bloqueo de freno manual a cada lado
- Rin radio
- Ruedas delanteras maciza de 6"
- Tapicería acolchada en lona azul (NYLON)
- Registro Sanitario: 2025DM-0012998 - RI

	Ancho de Despliegue	· 54 cm		Altura del Asiento	· 47 cm		Profundidad del Asiento	· 39 cm
	Ancho de plegado	· 22 cm		Largo Total	· 96 cm		Altura del Espaldar	· 40 cm
	Ancho del asiento	· 35 cm		Rueda Trasera Diámetro	· 22"		Peso máximo	· 100Kg
	Altura Total	· 88 cm		Rueda Delantera Diámetro	· 6"		Peso Total Silla	· 14,2Kg

Dimensiones empaque: 88*23*90 cm -Caja: 1 pieza

Instrucciones de uso

- Saque la silla de ruedas de la caja, ábrala



- Gire los reposapiés con los calapiés al lugar adecuado. Ajuste firmemente el tornillo de bajo del calapiés para evitar que se caiga.



- Cuando termine de usar, gírelos reposapiés hacia arriba hasta la posición vertical con ambas manos, sujete el centro de la tapicería de la silla en el borde delantero y trasero y levántelo.
- Capacidad máxima de carga 100kgs. Los usuarios no pueden exceder la máxima capacidad de carga.

Almacenamiento y condiciones de transporte

- Guarde la silla en un lugar de almacenamiento seco y ventilado
- La temperatura de almacenamiento es de 5 a 55°C

Mantenimiento

- Comprobar el ajuste de los tornillos y la estabilización de la silla antes de usar
- La limpieza regular evitará que el polvo se adhiera a los tubos y así mejorará el buen funcionamiento de la silla
- Cuando la silla presente óxido en la parte de la tornillería se recomienda aplicar Crema Rubi o brilla metal y limpiar con un trapo.
- Se recomienda NO usar esponjillas de acero para limpiar la silla debido a que puede rayar el material de la estructura.

Advertencias y precauciones

- Seguir TODAS las advertencias y precauciones del manual
- No Atreverse a SUBIR o BAJAR rampas o pendientes mayores de 10 grados
- No intente subir o bajar una pendiente con una película de agua, hielo o aceite
- No intente circular sobre bordillos u obstáculos. De lo contrario, su silla podría volcarse y provocarle daños corporales o daños al dispositivo
- No se pare en el marco o calapiés de la silla
- El uso debe hacerse en superficies planas

Garantía

- Un año por estructura
- Un mes por defectos de fábrica (tapicería y ensamblaje)
- Por desgaste en rodamiento, tapicería y uso inadecuado, no cubre la garantía