

CAMINADOR

Cod Inv: IMD961LW



Características

- ✓ Caminador plegable con marco en aluminio pla
- ✓ Mecanismo de plegado con manijas
- ✓ Almohadillas de agarre que ofrecen una sujeción cómoda y segura
- ✓ Asiento en lona
- ✓ Cada tubo de pie (pata) cuenta con un pin de bloqueo para ajustar la altura
- ✓ Ruedas delanteras
- ✓ Goma antideslizante Liviano y duradero
- ✓ Registro Sanitario: 2021DM

Descripción, propósito de uso y beneficios

Diseñado para brindar apoyo al usuario mejorando la estabilidad, equilibrio y seguridad en posición bípeda ayudando con la capacidad para caminar y la reeducación de la marcha, utilizado principalmente por personas de la tercera edad y pacientes en terapia de recuperación. Tienen silla que permite al paciente o usuario tomar periodos de descanso.

Especificaciones Técnicas:

	Ancho de despliegue	55 cm		Altura total	75-92cm		Peso Máximo	100Kg
	Ancho del asiento	46 cm		Diámetro Rueda	N/A		Peso Total	3,4Kg
Dimensiones empaque: 54*30*79cm - Caja: 4 pieza								

Instrucciones de uso

- ✓ Saque el caminador de la caja, retire la bolsa plástica, y abra el caminador.
- ✓ Después de abrir el caminador, ajuste cada tubo de pie (pata) traseros y delanteros, y manténgalo a la misma altura antes de usarlo.
- ✓ Para plegar el caminador cuando no lo use, presione el pin de plegado y al mismo tiempo, gire un marco del reposabrazos lateral hacia la derecha y el otro hacia la izquierda.
- ✓ Capacidad máxima de carga 100kgs.
Los usuarios no pueden exceder el máximo de esta capacidad.

Almacenamiento y condiciones de transporte

- ✓ Doble el andador cuando no lo use, dejándolo en un lugar de almacenamiento seco y ventilado
- ✓ La temperatura de almacenamiento es de 5 a 55°C

Mantenimiento

- ✓ Compruebe la estabilidad del andador antes de usar.
- ✓ La limpieza regular evitará que el polvo se adhiera a los tubos y así mejorará el buen funcionamiento del andador.

Advertencias y precauciones

- ✓ Seguir TODAS las advertencias y precauciones del manual.
- ✓ No ATREVERSE a SUBIR o BAJAR rampas con pendientes mayores de 10 grados.
- ✓ No intente subir o bajar una pendiente con una película de agua, hielo o aceite.
- ✓ No intente circular sobre bordillos u obstáculos. De lo contrario, su andador podría volcarse y provocarle daños corporales o daños al dispositivo.
- ✓ No se pare en el marco del andador.
- ✓ El uso debe hacerse en superficies planas.

- ✓ Un año por estructura
- ✓ Un mes por defectos de fábrica (tapicería y rodamiento)
- ✓ Por desgaste en rodamiento, tapicería y uso inadecuado, no cubre la garantía