

TANQUE DE PARAFINA

SM508 X3 LBS



- Proporciona un tratamiento de cera de parafina que hace la piel suave y tersa, con un efecto hidratante especialmente adecuado para pieles secas, envejecidas o ásperas.
temperatura se puede ajustar en incrementos de 5 °C mediante los botones de control.

Precauciones

Especificaciones Técnicas

Marca: ICMTHERAPY

Voltaje: 120v - 60Hz

Peso: 1,20kg (sin parafina)

Rango de temperatura: 0 - 100 °C

Tamaño: Altura 14cm, Ancho 36cm, largo 22cm **La**

No sobrepasar el tiempo de tratamiento recomendado.

Mantener el equipo desenchufado cuando no esté en uso. Limpiar la máquina después de cada uso para evitar acumulaciones de cera.

dispositivo.

*Colocar la cera en el interior de la máquina, encenderla y ajustar la temperatura deseada.

*Aplicar la cera una vez que haya alcanzado la temperatura adecuada.

*Retirar el exceso de cera con un paño después del tratamiento.

*Se recomienda el uso de guantes plástico desechables.

*Sumergir la zona a tratar durante 20-30 minutos para promover la circulación sanguínea y la elasticidad de la piel. *Apagar el equipo y desenchufarlo tras el uso

o m er mus pi
L er

ati s r ol od

Instrucciones de Uso

*Limpiar la parte del cuerpo que se va a tratar antes de usar el